

## Verwendungszweck

Vielen Dank für den Kauf unseres Hörverstärkers.

Wenn Sie feststellen, dass es zunehmend schwieriger wird, andere gut zu hören, kann Ihnen der Hörverstärker dabei helfen, Ihr Gehör wiederzuerlangen, so dass Sie Ihr gewohntes Leben weiterführen können.

Ein Hörverstärker zu tragen bedeutet, das Vergnügen wiederzuentdecken, sich mit Freunden und Familie zu treffen und zu unterhalten, sich sicherer zu fühlen bei der Arbeit und Filme, Musik und Fernsehprogramme wieder zu genießen.

## Bedienelemente



"0" ist ausgeschaltet. "N" ist eingeschaltet.

"0-4" ist Lautstärke, "0" = Minimal, "4" = Maximal

## Wie benutzt man den Hörverstärker?

1. Stecken Sie den Silikonohrstöpsel auf die Kopfhörerbasis. (Abbildung 1)
2. Stellen Sie den "ON"-Schalter auf "0" und stellen Sie die Lautstärke auf "1" ein, damit Sie nicht ggf. plötzlich einen lauten Einschaltton hören.

## Wie benutzt man den Hörverstärker?

3. Tragen Sie den Hörverstärker hinter Ihrem Ohr und stecken Sie den Ohrstöpsel fest in Ihr Ohr (Abbildung 2)
4. Stellen Sie den "ON"-Schalter auf "N" und regulieren Sie die Lautstärke entsprechende, um einen klaren Ton zu erhalten.
5. In geräuschvoller Umgebung können Sie die Modus-Taste drücken, um den Geräuschunterdrückungsmodus zu ändern. Das Drücken der "Mode"-Taste wird mit einem Piepton bestätigt. (Figur 3)

Normaler Modus	1 Signaltöne
Geräuschunterdrückungsmodus	2 Signaltöne
Geräuschunterdrückungsmodus	3 Signaltöne
Geräuschunterdrückungsmodus	4 Signaltöne

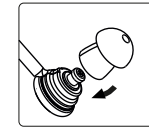


Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3

## So laden Sie den Hörverstärker auf

1. Wenn der Klang des Hörverstärkers sehr leise ist und der Hörverstärker nicht funktioniert, kann das daran liegen, dass die Batterie schwach ist. Wenn die Batterie schwach ist, gibt der Hörverstärker einen Piepton von sich. Ist dieses der Fall, laden Sie den Hörverstärker bitte rechtzeitig auf.
2. Schalten Sie den Hörverstärker beim Laden aus und stecken Sie ein Ende des DC 5V Ladesteckers in den Hörverstärker.
3. Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.
4. Der Hörverstärker sollte die ersten Male, wenn Sie ihn verwenden, 6 Stunden lang aufgeladen werden. Beim zweiten Mal sollte der Hörverstärker erst aufgeladen werden, wenn die Batterie vollständig entladen ist. So erreicht man nach nur wenigen aufeinanderfolgenden Ladezyklen, die beste Batterieleistung.
5. Die verbaute 60mAh Lithium-Batterie hält ca. 100 Stunden, nachdem Sie voll aufgeladen ist. (Achtung: Bitte verwenden Sie die verbaute Batterie und das mitgelieferte Ladegerät. Bauen sie das Gerät nicht auseinander und ersetzen sie die Batterie nicht.)



## Technische Eigenschaften

Artikel Nr.	70612
Ladegerät	DC5V/50mA-1A
Batterie	Lithiumbatterie mit 60mAh
Größe	45x40x10mm
Gewicht	ca. 6,5 g
Max Schalleistung	129 ± 4 dB
Schallverstärkung	38 ± 5 dB
Gesamtharmonische Wellenverzerrung	≤ 5%
Frequenzbereich	400Hz-3800Hz
Eingangsruschen	≤ 28 dB
Spannung	DC.3.7V
Strom	≤ 2mA

## Vorsichtsmaßnahmen

1. Wenn Sie ein Pfeifgeräusch hören, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie den Ohrstöpsel richtig eingesetzt haben oder verwenden Sie einen Ohrstöpsel in geeigneter Größe.

## Vorsichtsmaßnahmen

2. Bitte benutzen Sie den Hörverstärker nicht für längere Zeit auf hoher Lautstärke, da dieses Ihr Gehör schädigen kann.
3. Bitte pflegen Sie das Produkt regelmäßig, um zu vermeiden, dass der Ohrstöpsel und das Mikrofon durch Fremdkörper blockiert oder verunreinigt werden.
4. Bitte verwenden Sie den Hörverstärker nicht beim Duschen, Schwimmen, im Regnen oder in feuchter Umgebung. Bitte setzen Sie den Hörverstärker nicht der Sonne aus und kommen Sie nicht in die Nähe eines Ofens oder anderer Wärmequellen.
5. Bitte schützen Sie den Hörverstärker sorgfältig und vermeiden Sie es, ihn auf den Boden fallen zu lassen.
6. Halten Sie den Hörverstärker von den Kindern fern.
7. Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
8. Der Stecker des Adapters wird als Trennvorrichtung verwendet. Die Trennvorrichtung muss leicht zugänglich bleiben.
9. Auf die Umweltaspekte der Batterieentsorgung ist zu achten.
10. Bitte beachten Sie, dass die Batterien (Batteriepack oder Batterien) keiner übermäßigen Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden dürfen.

## Was tun, wenn Sie den Hörverstärker tragen?

1. Stellen Sie die Lautstärke vor dem Einschalten und Tragen auf das Minimum ein.
2. Wählen Sie einen etwas größeren Ohrstöpsel, um Pfeifgeräusche zu vermeiden.
3. Erhöhen Sie die Lautstärke schrittweise, um einen plötzlichen Tonanstieg zu vermeiden.
4. Wenn Sie ein „Heulen“ hören, überprüfen Sie ob die Größe des Ohrstöpsels passend ist und ob der ausgewählte Ohrstöpsel fest sitzt, sodass keine Luft austreten kann.
5. Halten Sie den Ohrstöpsel sauber.
6. Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie den Hörverstärker längere Zeit nicht benutzen.

Hiermit erklärt arcotec GmbH, dass sich das Gerät Hörverstärker, Art. Nr. 70612 in Übereinstimmung mit der Richtlinie EG befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann auf der Internetadresse [www.arcotec.de](http://www.arcotec.de) abgerufen werden.

Änderungen und Fehler in der Anleitung vorbehalten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

arcotec GmbH  
Hertzstrasse 15  
30827 Garbsen  
eMail : [info@arcotec.de](mailto:info@arcotec.de)



## Wiederaufladbarer Hörverstärker



Bedienungsanleitung